








LEGENDA JLAB PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 01 del 04/03/2020)

| TIPOLOGIA ESAME | KIT DA UTILIZZARE | COLORE PROVETTA | INDICAZIONI |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • EMOCROMO • VES • RETICOLOCITI • TEST DI COOMBS DIRETTO • ASSETTI EMOGLOBINICI • EMOGLOBINA GLICATA • SOTTOPOPOLAZIONI LINFOCITARIE • TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE • TEST DI GENETICA MOLECOLARE | <p>TAPPO LILLA 13x75 da 4,0 mL (sangue intero K2EDTA)</p> <p>CODICE:BD-368861</p> |  | <p>RDI: NO CENTRIFUGAZIONE</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2°C-8°C)</p> <p>SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI PLASMA CONGELATO PER ACTH, ALDOSTERONE, AMMONIO, CATECOLAMINE PLASMATICHE, RENINA E VITAMINA B6. SANGUE INTERO CONGELATO PER VITAMINA B1 E B2.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • TEST COAGULAZIONE SEMPLICE • TEST COAGULAZIONE SPECIALE • D-DIMERO • FATTORI COAGULATIVI | <p>TAPPO CELESTE 13x75 da 2,7 mL (Plasma Sodio Citrato)</p> <p>CODICE:BD-364305</p> |  | <p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10 A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2°C-8°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 15 A 4000 RPM E SEPARAZIONE PLASMA; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI. <u>PLASMA CONGELATO PER COAGULAZIONE SPECIALE E D-DIMERO</u></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • CHIMICA CLINICA • IMMUNOMETRIA • SIEROIMMUNOLOGIA SU ROCHE COBAS • ALLERGOLOGIA | <p>TAPPO GIALLO ROSSA 13x100 da 5 mL (Siero)</p> <p>CODICE: BD-367955</p> |  | <p>RDI e ADERENTI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3500 RPM E SEPARAZIONE SIERO; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> |


LEGENDA JLAB PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 01 del 04/03/2020)

| TIPOLOGIA ESAME | KIT DA UTILIZZARE | COLORE PROVETTA | INDICAZIONI |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ELETTROFORESI • IMMUNOELETTROFORESI • CDT • FARMACI • VITAMINE A, E | <p>TAPPO ROSSO 13x100 da 6,0 mL (Siero)</p> <p>CODICE: BD-368815</p> |  | <p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM E SEPARAZIONE SIERO; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>SIERO CONGELATO PER VITAMINA A, VITAMINA E</u></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • CURVE DA CARICO DI GLUCOSIO • GLICEMIE POST PRANDIALI • TUTTE LE GLICEMIE CHE NON POSSONO ESSERE CONSEGNATE IN GIORNATA IN RDI • ACIDO LATTICO | <p>TAPPO GRIGIO CHIARO 13x75 da 2,0 mL (Stabilizzante Fluoro ossalato)</p> <p>CODICE: BD-368920</p> |  | <p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM E SEPARAZIONE PLASMA; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>PLASMA CONGELATO PER ACIDO LATTICO</u></p> |

LEGENDA JLAB PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 01 del 04/03/2020)

| TIPOLOGIA ESAME | KIT DA UTILIZZARE | COLORE PROVETTA | INDICAZIONI |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ESAMI DI TOSSICOLOGIA • EMOGAS/BICARBONATI/CARBOSSI • EMOGLOBINA/METAEMOGLOBINA • ESAMI SU PLASMA CHE RDI INVIA IN SERVICE | <p>TAPPO VERDE SCURO 13x75 da 4,0 mL (Litio eparina)</p> <p>CODICE: BD-368884</p> |  | <p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM <u>SOLO PER ALLUMINIO, COBALTO E VITAMINA C</u></p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM E SEPARAZIONE PLASMA <u>SOLO PER ALLUMINIO, COBALTO, ZINCO E VITAMINA C;</u> CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>PLASMA CONGELATO PER VITAMINA C</u></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • ESAMI DI CITO-GENETICA | <p>TAPPO VERDE SCURO 13x100 da 6,0 mL (Sodio eparina)</p> <p>CODICE: BD-367876</p> |  | <p>RDI: NO CENTRIFUGAZIONE</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA 5°C- 25°C</p> <p>SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA 5°C- 25°C</p> |

LEGENDA JLAB PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 01 del 04/03/2020)

| TIPOLOGIA ESAME | KIT DA UTILIZZARE | COLORE PROVETTA | INDICAZIONI |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • QUANTIFERON | <p>TAPPI GRIGIO, VERDE, GIALLO, VIOLA 13x75 da 1,0 mL (sangue intero)</p> <p>SET per Quantiferon</p> <p>COD: BD-622526</p> |  | <p>RDI: TERMOSTATAZIONE 24 h. A 37°C; CENTRIFUGAZIONE PER 15' A 4000 RPM</p> <p>ADERENTI/SERVICE: riempire categoricamente le provette fino al segno nero.</p> <p>Miscelare le provette per inversione 10 volte assicurandosi che l'intera superficie interna delle provetta sia ricoperta di sangue in modo che gli antigeni presenti sulle pareti reagiscano.</p> <p>Le provette devono essere conservate, in posizione verticale, a temperatura ambiente ed inviate in RDI entro 16 ore dal prelievo.</p> |

Istruzioni per l'uso:

Le etichette devono essere applicate sulle provette in posizione verticale, riportando il numero del codice a barre rivolto in basso.