




LEGENDA CONTENITORI E PROVETTE PER GENETICA MEDICA RDI (rev. 1 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	PROVETTA CONTENITORE	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • CARIOTIPO STANDARD SANGUE PERIFERICO • CARIOTIPO ALTA RISOLUZIONE SANGUE PERIFERICO <p>Nota: compilare MD-LAB-GM-02 e consenso</p>	<p><u>TAPPO VERDE SCURO 13x100</u> <u>6,0 mL</u> (Sodio eparina) CODICE: 367876</p>		<p>RDI: NO CENTRIFUGAZIONE</p> <p>ADERENTI E SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA 5°C - 25°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • CARIOTIPO SU LIQUIDO AMNIOTICO • ARRAY-CGH SU LIQUIDO AMNIOTICO • QF-PCR • INDAGINI DNA SU LIQUIDO AMNIOTICO <p>Nota: compilare MD-LAB-GM-01 e consenso</p>	<p><u>PROVETTA CONICA STERILE 13x150</u> <u>15 mL</u> (sterilizzata a raggi gamma) CODICE: F2096</p>		<p>RDI: NO CENTRIFUGAZIONE</p> <p>ADERENTI E SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA 5°C - 25°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • CARIOTIPO SU VILLI CORIALI • ARRAY-CGH SU VILLI CORIALI • INDAGINI DNA SU VILLI CORIALI <p>Nota: compilare MD-LAB-GM-01 e consenso</p>	<p><u>PROVETTA CONICA STERILE 13x150</u> <u>15 mL</u> con aggiunta di terreno di trasporto (sterilizzata a raggi gamma) CODICE: F2096</p>		<p>RDI: NO CENTRIFUGAZIONE</p> <p>ADERENTI E SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA 5°C- 25°C</p>

LEGENDA CONTENITORI E PROVETTE PER GENETICA MEDICA RDI (rev. 1 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	PROVETTA CONTENITORE	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • CARIOTIPO TESSUTO ABORTIVO • ARRAY-CGH SU TESSUTO ABORTIVO • INDAGINI DNA SU TESSUTO ABORTIVO <p>Nota: compilare MD-LAB-GM-01 e consenso</p>	<p>BARATTOLO STERILE</p> <p>CONTENENTE FISIOLÓGICA STERILE O TERRENO DI TRASPORTO PER VILLI CORIALI</p>		<p>ACCERTARSI CHE IL CAMPIONE SIA CHIUSO ERMETICAMENTE</p> <p>ADERENTI/SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA 5°C- 25°C</p> <p>NB: PER CONSEGNE SUCCESSIVE A 24 ORE CONSERVARE IN FRIGORIFERO (4-8°C)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • TEST DI GENETICA MOLECOLARE SU SANGUE PERIFERICO <p>Nota: compilare MD-LAB-GM-02 e consenso</p>	<p><u>TAPPO LILLA 13x75</u> 4,0 mL (K2 EDTA) CODICE: 368861</p>		<p>RDI: NO CENTRIFUGAZIONE</p> <p>ADERENTI E SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA 5°C- 25°C</p>

LEGENDA CONTENITORI E PROVETTE PER GENETICA MEDICA RDI (rev. 1 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	PROVETTA CONTENITORE	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> TEST DI GENETICA MOLECOLARE SU TAMPONE BUCCALE <p>Nota: compilare MD-LAB-GM-02 e consenso</p>	<p><u>TAMPONE A SECCO</u></p>		<p>ADERENTI E SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA 5°C- 25°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> TEST NIPT (HARMONY, G-TEST) <p>Nota: compilare Modulo Specifico e consenso</p>	<p><u>PROVETTE STRECK IN KIT DEDICATO</u></p>		<p>ADERENTI/SERVICE: Riempire le provette fino al segno nero. Miscelare le provette per inversione 10 volte assicurandosi che l'intera superficie interna delle provetta sia ricoperta di sangue in modo che gli antigeni presenti sulle pareti reagiscano. Le provette devono essere conservate nel Kit e consegnate in RDI entro 16 ore dal prelievo.</p> <p>CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA 5°C- 25°C</p>

Istruzioni per l'uso:

Le etichette devono essere applicate sulle provette con il lato sinistro rivolto verso il tappo.

Al campione va allegato lo specifico modulo di richiesta e consenso compilati e firmati.