







LEGENDA FLACONI E CONTENITORI PER MICROBIOLOGIA RDI (rev. 1 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	TAMPONE/CONTENITORE	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • EMOCOLTURA • LIQUIDI CAVITARI • (LIQUOR) 	<p>FLACONI DEDICATI PER AEROBI E ANAEROBI</p>		<p>RDI: CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE</p> <p>ADERENTI E SERVICE: CONSERVARE E TRASPORTARE I CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE</p>
<p>TAMPONI URETRALI E TAMPONI CERVICALI (Mycoplasmi, Neisseriae, Chlamydia e germi comuni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TAMPONE SOTTILE PER LA SEDE URETRALE CON TERRENO AMIES DI TRASPORTO • TAMPONE SPESSO PER LA SEDE CERVICALE CON TERRENO AMIES DI TRASPORTO 		<p>RDI: CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE</p> <p>ADERENTI E SERVICE: CONSERVARE E TRASPORTARE I CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE</p>



LEGENDA FLACONI E CONTENITORI PER MICROBIOLOGIA RDI (rev. 1 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	TAMPONE/CONTENITORE	INDICAZIONI
<p>RACCOLTA FECI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COPROCOLTURA • E. COLI (O:157) • YERSINIA ENT. • SANGUE OCCULTO • ANTIGENI VIRALI • TOSSINA E ANTIGENE CLOSTRIDIUM DIFFICILE • FECI COMPLETO • RICERCA LIEVITI 	<p>CONTENITORE CON PALETTA</p>		<p>RDI: CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2-8°C); A TEMPERATURA AMBIENTE PER PARASSITI</p>
<ul style="list-style-type: none"> • TAMPONE FARINGEO • NASALE • AURICOLARE • OCULARE • LINGUALE • GENGIVALE • VAGINALE • VULVARE • CUTANEO • RETTALE • FERITE E COLTURALI GENERICI 	<p>TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO AMIES (LIQUIDO)</p>		<p>RDI: CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2-8°C)</p> <p>SERVICE: TRASPORTO E CONSERVAZIONE A TEMPERATURA CONTROLLATA (2-8°C)</p>

LEGENDA FLACONI E CONTENITORI PER MICROBIOLOGIA RDI (rev. 1 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	TAMPONE/CONTENITORE	INDICAZIONI
<p>RICERCA (RAPIDA) STREPTOCOCCO GR. A (Str. Pyogenes)</p>	<p>TAMPONE SECCO (SENZA TERRENO DI TRASPORTO)</p>		<p>RDI: CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE</p> <p>ADERENTI E SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE</p>
<ul style="list-style-type: none"> • TAMPONE FARINGEO • NASALE • AURICOLARE • OCULARE • LINGUALE • GENGIVALE • VAGINALE • VULVARE • CUTANEO • RETTALE • FERITE E COLTURALI GENERICI 	<p>TAMPONE CON TERRENO DI TRASPORTO AMIES (GELIFICATO)</p>		<p>RDI: CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE</p> <p>ADERENTI E SERVICE : CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (2-8°C)</p>

LEGENDA FLACONI E CONTENITORI PER MICROBIOLOGIA RDI (rev. 1 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	TAMPONE/CONTENITORE	INDICAZIONI
<p>LIQUIDI ORGANICI (LIQUIDO SEMINALE, ESPETTORATO) FRAMMENTI UNGUEALI, CAPELLI E SCAGLIE CUTANEE</p>	<p>CONTENITORE STERILE</p>		<p>RDI: CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE</p> <p>ADERENTI E SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA AMBIENTE</p>
<p>FECI per RICERCA PARASSITI E LORO UOVA</p>	<p>CONTENITORE DEDICATO CON LIQUIDO FISSATIVO E CONSERVANTE</p>		<p>CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE</p>